


► Abnahme von Vollblut für eine DNA-Analyse im Rahmen einer Liquid Biopsy

Erforderliches Material:

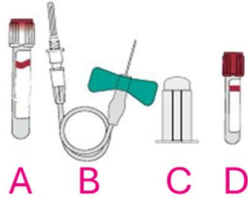

- (A) STRECK Cell-Free DNA BCT®
- (B) BD Vacutainer Safety-Lok 21G Blutentnahme-Set
- (C) Einweg-Halterung
- (D) Entsorgungsröhrchen

Vorsichtsmaßnahmen:


- STRECK-Röhrchen (A) dürfen nicht eingefroren werden.
- Im Umgang mit Glasröhrchen ist Vorsicht geboten.
- Tragen Sie bei der Blutabnahme Einmalhandschuhe, da es sich um potentiell infektiöses Material handeln kann.
- Eine ausführliche Gebrauchsanweisung für die Verwendung von STRECK-Röhrchen finden Sie auf der Homepage der Firma STRECK unter www.streck.com

Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das STRECK-Röhrchen (A) bei Raumtemperatur (18°C-25°C) gelagert wird.
- Stellen Sie vor der Blutentnahme sicher, dass das STRECK-Röhrchen (A) ordnungsgemäß mit der Patientenidentifikation beschriftet ist.
- Wenn das STRECK-Röhrchen das einzige Röhrchen ist, sollte eine kleine Menge Blut in ein „Entsorgungsröhrchen“ (D) entnommen werden, bevor das STRECK-Röhrchen angehängt wird. Ist dies nicht der Fall, sollte es das letzte Entnahmeröhrchen in der Reihe sein.
- Achten Sie bei der Verwendung der STRECK-Röhrchen auf das Mindesthaltbarkeitsdatum.

Durchführung der Blutabnahme:

1. Führen Sie mit dem Blutabnahmeset (B, BD Vacutainer Safety Lok) und der Einweg-Halterung (C) eine Venenpunktion durch.
2. Halten Sie während der Blutabnahme das STRECK-Röhrchen senkrecht unterhalb des Armes des Patienten.
3. Füllen Sie das STRECK-Röhrchen vollständig mit Blut (ca. 10 ml) und vergewissern Sie sich, dass kein Blut mehr in das Röhrchen fließt, bevor Sie es aus dem Einweg-Halter nehmen.
4. Invertieren Sie das STRECK-Röhrchen unverzüglich 8- bis 10-mal. Nicht Schütteln!

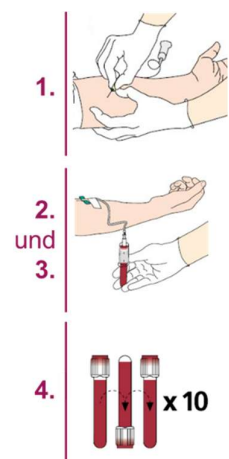

Versand und Lagerung:

- Verschicken Sie die Blutprobe per Post mit dem zugehörigen Anforderungsformular so schnell wie möglich bei Raumtemperatur, vor Bruch geschützt und sicher verpackt in einem entsprechenden Transportbehälter.
- Vermeiden Sie den Versand über das Wochenende oder Feiertage, um eine gute Probenqualität aufrecht zu erhalten. Sollte sich der Versand verzögern, ist eine kurzfristige Lagerung (maximal 5 Tage) bei Raumtemperatur möglich.

Eine Vorabinformation zu geplanten Probeneingängen hilft uns, die Probe möglichst schnell zu bearbeiten. Sie erreichen uns hierfür unter **+49 6131 27661-0** oder info@medgen-mainz.de.